

فروش دستگاه پلاتینیوم

لیزر پلاتینیوم



2021  
Platinum



# فروش دستگاه پلاتینیوم



## 2021

### Platinum Plus

#### لیزر پلاتینیوم پلاس

- دارای ۳ طول موج همزمان
- ال سی دی بزرگتر نسبت به دستگاه پلاتینیوم
- دارای چیلر بزرگ



# فروش دستگاه پلاتینیوم

## لیزر پلاتینیوم

لیزر پلاتینیوم جدیدترین و موثرترین لیزر در زمینه لیزر موهای زائد برای انواع مو و پوست با رنگ‌های مختلف می‌باشد.

این دستگاه مجهز به TEC سیستم خنک کننده بسیار قوی برای تماس با پوست می‌باشد که می‌تواند با وجود این قابلیت، توان‌های بالای لیزر را بدون درد و سوختگی روی سطح پوست اعمال نماید.

لیزر پلاتینیوم سه طول موج را در یک هندپیس نوآورانه ترکیب می‌کند که به طور همزمان عمق بافت‌های مختلف و همچنین ساختارهای تشریحی فولیکول مو را هدف قرار می‌دهد



# فروش دستگاه پلاتینیوم

Soprano ICE Platinum مزایای هم افزایی ۳ تا از موثرترین طول موج موها را که برای حذف موهای زائد پیشنهاد می کند که هر کدام از ساختارهای مختلف فولیکول مو را مورد هدف قرار می دهند.

## این طول موج ها عبارتند از:

طول موج ۷۵۵ نانومتر (الکس)

طول موج ۸۰۸ نانومتر (دایود ۹)

طول موج ۱۰۶۴ نانومتر (ان دی یگ)





# فروش دستگاه پلاتینیوم

با استفاده از ترکیب سطوح جذب و نفوذ سه طول موج مختلف، همراه با پوشش درمان، راحتی و مراقبت کمتر نسبت به لیزر دایود Soprano ICE Platinum امروزه به عنوان یک درمان موثر و جامع برای حذف موهای زائد در دسترس است.

دستگاه لیزر پلاتینیوم دارای طول موج‌های متفاوتی می‌باشد که قابل تنظیم برای رنگ پوست‌های روشن و پوست‌های گندمی و همچنین قابل تنظیم جداگانه برای آقایان و بانوان می‌باشد.



# فروش دستگاه پلاتینیوم

## طول موج 808 NM (دایود)

طول موج 810 نانومتر دایود به عنوان طول موج کلاسیک در لیزر موهای زائد با نفوذ عمیق در فولیکول مو با قدرت متوسط بالا، میزان تکرار بالا و اندازه بزرگ (2 سانتی متر) درمان سریعی را ارائه می‌دهد.

توانایی نفوذ عمیق آن Bulge و Bulb فولیکول مو را هدف قرار می‌دهد و با توجه به عمق نفوذ عمیق بافت، آن را برای درمان دست‌ها، پاها، گونه‌ها و ریش‌ها ایده آل می‌کند.



فروش دستگاه پلاتینیوم

# معرفی طول موج های دستگاه پلاتینیوم

Alex | Diode | Nd:yag



# فروش دستگاه پلاتینیوم

## طول موج 1064 NM (ان دی یگ)

طول موج 1064 YAG که با جذب ملانین پایین تر مشخص می شود، و این یک راه حل متمرکز برای انواع پوست های تیره تر است. در عین حال، طول 1064nm عمیق ترین نفوذ فولیکول مو را ارائه می دهد، به این ترتیب می تواند Bulb و Papilla را هدف قرار دهد و همچنین موهای عمیق جاسازی شده را در مناطقی از قبیل پوست سر، چاله های بازو و ناحیه شکمی درمان کند.





# فروش دستگاه پلاتینیوم

## طول موج 755 NM (الکس)

طول موج الکساندرایت جذب انرژی بیشتری را از طریق کروموفور ملانین به ارمغان می‌آورد، و آن را برای طیف وسیعی از انواع موها و رنگ‌ها، مخصوصاً موهای نازک ایده‌آل می‌کند. با نفوذ سطحی بیشتر، طول موج 755 نانومتر بالج مو را مورد هدف قرار داده و برای موهای سطحی مانند ابرو و لب فوقانی موثر است.



## فروش دستگاه پلاتینیوم

**امکان بازگشت فوری  
به فعالیت‌های عادی  
پس از درمان وجود دارد؟**



# فروش دستگاه پلاتینیوم

بله، شما می‌توانید بلافاصله پس از درمان فعالیت‌های عادی و شغلی خود را شروع کنید.

پس از لیزر موهای زائد، ناحیه درمان شده ممکن است احساسی شبیه به آفتاب‌سوختگی خفیف برای ۲۴ ساعت یا بیشتر داشته باشد.

همچنین در این حالت کمی قرمزی و ورم در اطراف پیازهای مو مشاهده می‌شود و این شرایط نشانه‌ای از واکنش مناسب ناحیه موردنظر به روش درمانی می‌باشد. هرچند در این زمان لازم است از مصرف کرم‌های خاص همچون کرم‌های حاوی اسید گلیکولیک یا رتینوئیدها یا سایر موارد مانند آن اجتناب شود، استفاده از لوازم آرایشی به فاصله کوتاه پس از درمان بر روی ناحیه درمان شده بلامانع خواهد بود



فروش دستگاه پلاتینیوم

**آیا لیزر می‌تواند  
مضراتی هم داشته باشد؟**






## فروش دستگاه پلاتینیوم

اگر فرد آفتاب گرفته باشد ممکن است پوستش بسوزد و جای آن لک های سفید ایجاد شود. همچنین اگر بعد از لیزر مراقبت های لازم را رعایت نکند یا در صورت ایجاد زخم آن را دستکاری کند و تاول ایجاد شود، ممکن است جای آن اسکار باقی بماند.

علاوه بر این اگر فردی که از لیزر استفاده می کند تبصره کافی نداشته باشد و شرایط دستگاه را براساس رنگ پوست بیمار درست تنظیم نکند، ممکن است منجر به ایجاد زخم، لک و تاول شود.

در غیر این صورت تا به حال عوارضی برای لیزر گزارش داده نشده است و روشی بی ضرر محسوب می شود.



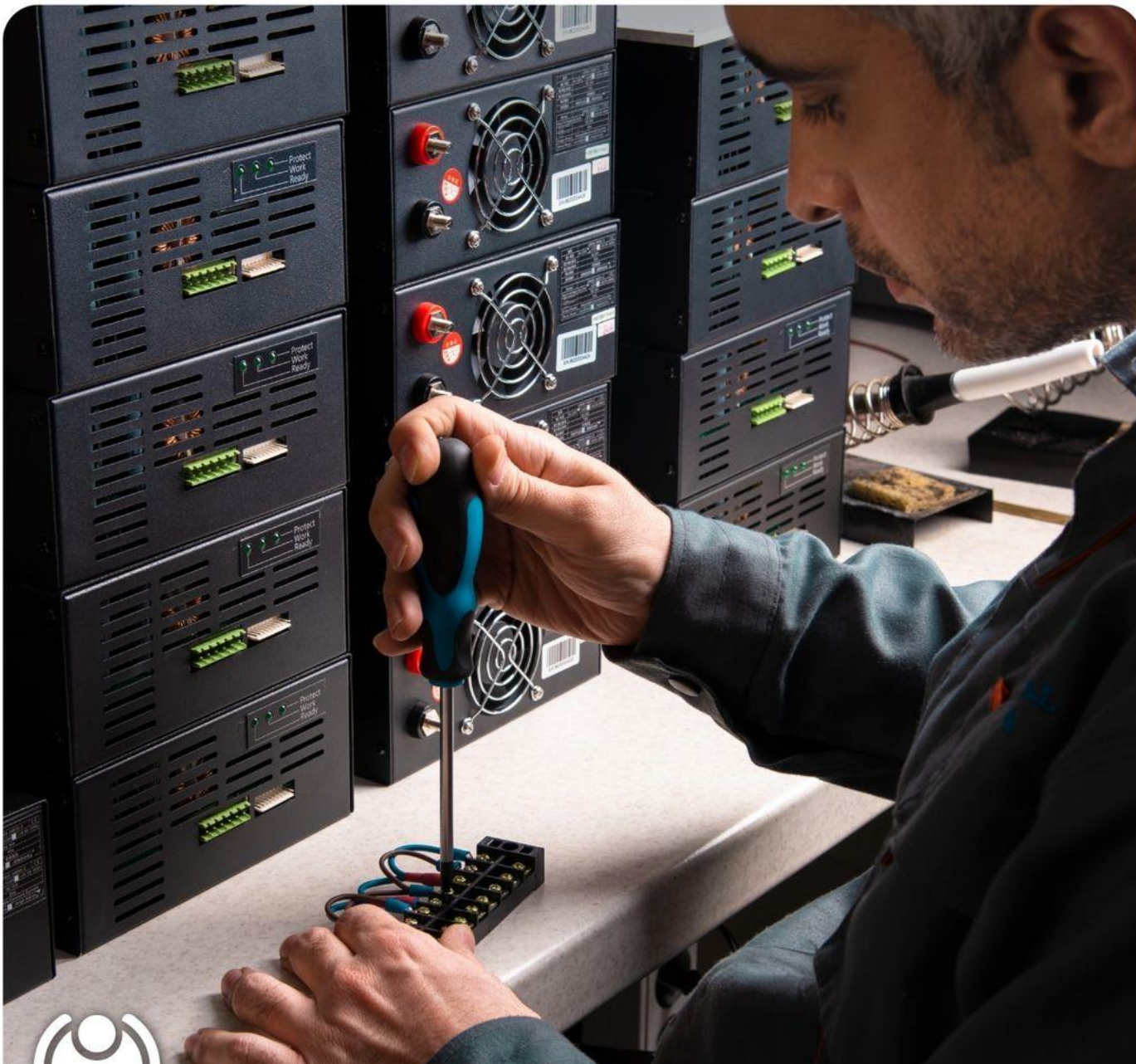

فروش دستگاه پلاتینیوم